



# Ansetzen der A°-Wipes Eimer mit 1-1,5 L gebrauchsfertiger Lösung



- 1) **Arbeitsmittel bereitstellen und Schutzkleidung anlegen:**  
A°-Wipes-Eimer & -Tuchrolle, Flächendesinfektionsmittel, Schutzhandschuhe & -brille, 1 L Messbecher, Permanentmarker



- 2) **Zum Personenschutz bzw. zum Schutz vor Kontamination der A°-Wipes empfehlen wir die Arbeitsfläche vorher z. B. mit Descorapid Tüchern oder Biguacid Liquid zu desinfizieren. Dazu sollten Schutzkittel und Schutzhandschuhe getragen werden.**



- 3) **Trockene A°-Wipes-Tuchrolle in einen neuen oder den aufbereiteten Eimer geben...**



...erstes Tuch aus der Mitte der Rolle ein kleines Stück herausziehen.



- 4) **Tuchrolle mit 1 L gebrauchsfertigem Flächendesinfektionsmittel langsam von der Mitte nach außen übergießen.**



- 5) **weitere 500 ml des Flächendesinfektionsmittels abmessen und ebenfalls über die Tuchrolle gießen.**



- 6) **Anfangstuch durch die Deckelöffnung ziehen ...**



...und den Deckel fest verschließen.



- 7) **Die Lösung mindestens 30 min einwirken lassen. Anfangstuch verwerfen.**



- 8) **Aufkleber mit wasserfestem Permanentmarker beschriften:**  
Produkt: z.B. **Descogen Liquid r.f.u.**  
Charge: z.B. z.B.: **14003**  
Konzentration: **100 %**  
Einwirkzeit: z.B. **30 min**  
Desinfektionsmittel eingefüllt am: „heutiges Datum“  
verwendbar bis: „heutiges Datum + **Standzeit** je nach Produkt“

Bei ausgewählten Antiseptica Produkten beträgt die Standzeit bis zu 28 Tage.  
Nur Descogen® Liquid r.f.u. kann mit einer Standzeit von bis zu 14 Tagen eingesetzt werden. (siehe Produktinformationsblatt)