



Aufbereitung der **A°-Wipes-Eimer**

Nach Aufbrauchen der Tuchrolle / vor Befüllung mit einer neuen Tuchrolle muss der Eimer gründlich maschinell oder manuell aufbereitet werden.

Vor der Aufbereitung müssen alle Desinfektionsmittel- oder Vliestuchreste aus dem Eimer entfernt werden.

- manuelles, 2-stufiges Verfahren

1. Gründliche **Reinigung**, z.B. durch Auswischen mit einem mit Reinigungsmittel ausreichend getränkten, abrasiven, saugfähigen Tuch oder durch Ausspülen mit heißem Wasser (55 – 60 °C); anschließend mit einem Einmaltuch trocken wischen.
2. **Scheuer-Wisch-Desinfektion** aller Oberflächen des Eimers und Deckels (vorzugsweise mit einem alkoholischen Schnelldesinfektionsmittel, z.B. Biguacid Liquid).

oder

- wenn möglich thermisch

z.B. 80 °C – 5 min (bei einem A_0 -Wert von 300) bzw. chemo-thermisch. Der A°-Wipes Eimer kann bei max. 100 °C bis zu 15 min thermisch aufbereitet werden.

Vorsicht: Eimer darf während der maschinellen Aufbereitung nicht deformiert oder zusammengedrückt werden!

Bitte beachten Sie die VAH-Empfehlungen & -Kontrollmaßnahmen!